


Draadloze plaswekker

Productinformatie

Gebruiksaanwijzing

Garantie

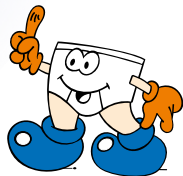

Bedankt,

dat u heeft gekozen voor de Rodger plaswekker

Wij weten uit ervaring dat u, bij goed gebruik, succes zult hebben. Wij verzoeken u vriendelijk alle instructies te lezen en op te volgen.

- De Rodger plaswekker is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
- Begin de training gemotiveerd, ontspannen en vol goede moed.
- Voer de plaswekkertest uit om uzelf en uw kind in kennis te stellen van de werking en het geluid van de plaswekker. Herhaal dit voordat uw kind gaat slapen.
- Maak van de training geen wedstrijd, dit veroorzaakt spanning en werkt averechts.
- Plaats de ontvanger op enige afstand van het bed, zodat uw kind uit bed moet om het alarm uit te schakelen.
- Beloon uw kind af en toe als het goed gaat. Cadeautje of.....
- Blijf de plaswekker elke nacht gebruiken, totdat uw kind 14 dagen achter elkaar niet in bed geplast heeft.
- Een succesvolle behandeling met de Rodger plaswekker duurt enkele weken tot enkele maanden. Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes.
- Gebruik de plaswekker gedurende de training iedere nacht zonder onderbreking.
- Is er binnen 3 maanden geen enkele verbetering, raadpleeg dan een arts om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
- Begin niet met de training als er binnenkort bijzondere omstandigheden zijn, bijv. een verhuizing of geboorte.
- Wek uw kind 's avonds niet meer om nog een plas te laten doen.
- Straf uw kind nooit, het kan er niets aan doen als het een keer mis gaat.
- Niet of minder drinken heeft geen invloed op bedplassen, dus niet verbieden. Echter, 's avonds liever geen koffie, thee, chocolade of koolzuurhoudende dranken.
- In de eerste dagen van de training is het mogelijk dat een erg diepe slaper niet wakker wordt. U zou dan een ander geluid van de wekker kunnen kiezen. Een andere goede oplossing kan zijn om bij uw kind te gaan slapen en bij het eerste signaal van de wekker uw kind te helpen met het wakker worden. Meestal zal uw kind dan na een paar dagen zelf op het geluid reageren en uit zichzelf wakker worden.
- Indien er sprake is van een terugval, dan is een korte training gewoonlijk voldoende. Bewaar daarom de plaswekker zorgvuldig.

Ingebruikname plaswekker

- Plaats de stekker in de ontvanger.
- Plaats de ontvanger in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. het indrukken van de centrale LED knop (A), deze licht nu groen op.

Koppelen zender en tweede ontvanger:

- Plaats de ontvanger in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. het indrukken van de centrale LED knop (A), deze licht nu groen op.
- Druk de – en + knop (B+C) gelijktijdig in gedurende 3 seconden.
- De centrale LED knop (A) begint groen te knippen: u heeft nu 1 minuut de tijd om de drukknopen van de zender tegen de metalen strip (F) van de ontvanger te houden. De zender en ontvanger zijn aan elkaar gekoppeld wanneer de LED groen oplicht en de ontvanger een geluidssignaal afgeeft.

Plaswekkertest:

- Zorg ervoor dat de ontvanger aanstaat en het geluid goed is ingesteld met de + knop (C).
- Verbind de drukknopen van de zender met de metalen strip (F) op de ontvanger. Hierdoor zal het alarm afgaan en begint de LED (A) rood te knippen.
- Het alarm kan uitgeschakeld worden door de centrale LED knop (A) in te drukken.

Instellen alarmgeluiden:

Bij elk alarm hetzelfde geluid:

Selecteer met de SELECT-knop (D) het gewenste geluid. Het laatst geselecteerde geluid zal bij elk alarm te horen zijn. Dit is te testen door de drukknopen van de zender tegen de metalen strip (F) van de ontvanger te houden. Hierdoor zal het alarm afgaan en begint de LED (A) rood te knippen.

Bij elk alarm een ander geluid:

Druk de AUTO-knop (E) in. Bij elk alarm zal er 1 van de 8 beschikbare geluiden te horen zijn.

Bereik:

Het bereik van zender en ontvanger is maximaal 30 meter in de openlucht. Binnen gebouwen is het bereik vaak enkele meters minder.

Tips voor gebruik:

- Verwijder altijd onmiddellijk de zender van een nat broekje. Dit verlengt de levensduur van de batterij en voorkomt schade aan het broekje.
- De zender voor het wassen van het broekje verwijderen! De garantie vervalt indien de zender wordt mee gewassen.

- Andere zenders in de nabijheid (bijv. een draadloze babyfoon, garagedeuropener, weerstation, koptelefoon e.d.) kunnen op de plaswекker storen. Verander de frequenties van de andere apparaten of verwijder ze.

Waarschuwing:

Zorg voor voldoende ventilatie rondom de ontvanger.

Houd bij het weggooien van de batterijen rekening met lokale wetten en voorschriften.

Broekjes

Wassen:

De broekjes dienen voor gebruik te worden gewassen. Ze nemen dan beter vocht op. De broekjes kunnen in de wasmachine, centrifuge en droger. Broekjes beslist niet wringen! Vermijd wasverzachter evenals chloorhoudende wasmiddelen. Als de reactie van de broekjes minder wordt, week de broekjes circa 30 minuten in warm azijnwater (1 kopje azijn en 2 kopjes water).

Broekjestest:

- Neem een kopje lauw zoutwater (1 theelepeltje zout in 1 kopje water).
- Klik de zender op het broekje.
- Steek de ontvanger in het stopcontact (of gebruik batterijen).
- Zorg ervoor dat de ontvanger aanstaat en het geluid goed is ingesteld met de + knop (C).
- Druppel twee theelepels van deze zoutoplossing op de voorzijde van het broekje. Hierdoor zal het alarm afgaan en begint de LED (A) rood te knipperen.
- Het alarm kan uitgeschakeld worden door de centrale LED knop (A) in te drukken.

Verklaring instructie pictogrammen

1. Steek ontvanger in het stopcontact. Zet ontvanger aan en stel volume in.
2. Broekje aantrekken.
3. Bevestig zender op broekje.
4. Welterusten.
5. Ontvanger geeft alarm bij plassen.
6. Opstaan, wekker uit, zender verwijderen, ga naar het toilet.
7. Herhaal 2 en 3, welterusten.
8. Droog!!!

Verklaring plaskalender



Droog: Doorgeslapen

Droog: Naar het toilet geweest



Nat: Wakker van alarm

Nat: Niet wakker van alarm



Kind: Droge nacht; kind plakt sticker.
Ouders: Resultaat aankruisen.

Online plaskalender

De online plaskalender is een interactieve versie van de standaard plaskalender en werkt zeer motiverend bij de training. U krijgt bij gebruik informatieve boodschappen

	1	2		4			
	WC	WC	X	WC	WC	X	WC
	X			X			

over de voortgang van de training. Bij een droge nacht mag uw kind een spelletje uitkiezen als beloning. Verdere instructies: www.rodger.nl.

Trilkussen

Voor dove of slechthorende kinderen kunt u optioneel een trilkussen bestellen dat aangesloten kan worden op de plaswекker (G). Dit trilkussen kan ook een goed hulpmiddel zijn voor kinderen die een extra prikkel nodig hebben om te reageren op de plaswекker. Het trilkussen kan onder het hoofdkussen gelegd worden, zodat uw kind een trilsignaal krijgt als de plaswекker afgaat.



Matrasbeschermers



Matrasbeschermers houden beddengoed en matras droog als uw kind in bed plast. Zie www.rodger.nl.

Helpdesk

Bij vragen over de training of het gebruik van de plaswекker kunt u contact opnemen met onze helpdesk:


E-mail: support@rodger.nl

Tel: +31 (0)541 – 35 14 49 (10.00-16.00 uur)

Correcte verwijdering van dit product

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

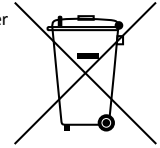

Let op

De stekker dient om het toestel helemaal uit te schakelen. Het uitgeschakelde toestel blijft gereed voor onmiddellijk gebruik. Explosiegevaar aanwezig als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruikte batterijen dienen volgens de aanwijzingen te worden ingeleverd.

Garantie

Rodger hanteert een garantietermijn van een jaar na ontvangst van de plaswекker door de koper. De garantie omvat fabricage-en/ of materiaalfouten en een defect dat is ontstaan onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Rodger B.V. Uitgesloten is schade ontstaan door onzorgvuldig handelen of het niet opvolgen van de instructies zoals in de gebruiksaanwijzing vermeld. Alleen op vertoon van de aankoopbon kan de koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie. De garantie vervalt indien reparaties door derden zijn uitgevoerd. Rodger behoudt zich het recht voor om specificaties en garantieverplichtingen zonder opgave van redenen aankondiging eenzijdig te wijzigen.

